

Esclarecimentos técnicos de produtos médicos

Identificação do produto:

Cânula com Trocarte descartável com lâmina para procedimento endoscópico

Marca: GEYI Medical.


Registro ANVISA: 10289680145



Prezado Dr (a) da equipe de Vídeo Cirurgia ,

Pensando em uma forma de contribuir, selecionamos algumas orientações importantes para o bom desempenho do produto, buscando assim promover a segurança sanitária do material médico adquirido, para que as orientações aqui contidas, possam contribuir para o dia a dia da prática assistencial, sendo elas:

1. Escolha a cânula e o Trocarte no comprimento e diâmetro adequado para o procedimento
2. Use sempre um instrumental adequado ao tamanho do Trocarte escolhido para o procedimento;
3. Remova a cânula e o Trocarte de sua embalagem e verifique a integridade dos mesmos e seu correto funcionamento;
4. A tampa superior da válvula anti-refluxo pode ser retirada para passagem de instrumentais maiores,

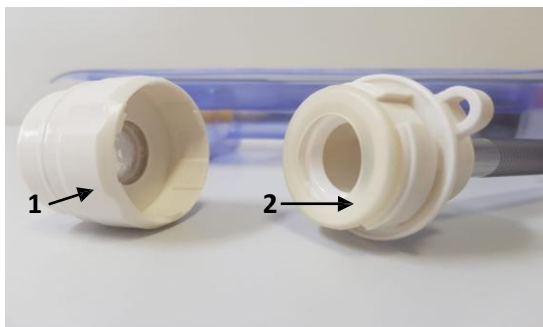

1 – Válvula anti-refluxo superior: usada para passagem de instrumental de menor tamanho

2 – Anel de vedação – removível

3 – Válvula superior Membrana de vedação para instrumentais menores

4 - Válvula inferior – Membrana vedação para uso de instrumentais maiores

